

# Orthèses de Maintien Effet froid & action décontractante



## Poignet, dos, cheville, genou, coude

La nouvelle gamme de textiles actifs Dr Rechell combine, pour la première fois, l'action d'une orthèse de maintien auto-ajustable à une recharge active aux huiles essentielles. L'orthèse, souple et confortable, assure un maintien efficace de l'articulation tout au long de la journée. Son action est combinée à un dispositif actif qui diffuse des extraits naturels procurant apaisement et décontraction des muscles et articulations.

La recharge assure une efficacité sur 7 jours minimum à raison d'un port de 8h/jour et jusqu'à 1 mois en utilisation ponctuelle :

- > Soulagement immédiat et durable\*
- > Recharge lavable et repositionnable
- > Pratique et confortable



173625



173674



173633



173641



173658



173666

### COMPOSITION

Recharge : Huile essentielle de Gaulthérie, Menthol.  
Textile : 21% Nylon, 25% Polyester, 54% Neoprène.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer la recharge adhésive sur l'orthèse. Placer ensuite l'orthèse de manière à ce que le dispositif se retrouve en contact avec la peau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient du linalool et du limonène : peut déclencher une réaction allergique. Ne pas utiliser ce dispositif en cas de traitement anti-coagulant ; chez les personnes épileptiques ou ayant des antécédents de convulsion. Ne pas appliquer plus de 8 heures par jour. Se laver les mains après utilisation et éviter tout contact avec les yeux. Ne pas appliquer sur une peau abîmée (plaie, brûlure, coup de soleil). En cas de réaction cutanée, arrêtez l'utilisation et consultez immédiatement un médecin. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, femmes enceintes ou allaitant.

\*Efficacité clinique démontrée en laboratoire indépendant sur un panel de 33 personnes.  
Technologie brevetée. Dispositif médical.



Chemin des Monges  
BP9 / 31450 DEYME / France  
Tél. : 05 62 71 78 88 / Fax : 05 61 81 54 90